

ZeptAir

Hordozható aeroszol terápia




Hordozható membrános inhalátor

A **ZeptAir** egy innovatív ultrahangos porlasztó megoldást alkalmazó készülék, amely hatékony, hordozható és praktikus kezelést biztosít a krónikus légzőszervi betegségekben, például asztmában, hörghurutban, krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) és tüdőgyulladásban szenvedő gyermekek és felnőttek egyre népesebb csoportja számára.

Ez a kiemelkedően hatékony terápiás rendszer magas porlasztási sebességgel rendelkezik, és percnként akár 0,9 ml gyógyszert is képes kibocsátani, ezzel rövid és hatékony aeroszolos kezelést biztosítva. A gyors gyógyszeradagolás mellett kevesebb a gyógyszerpazarlás.



Tüdő

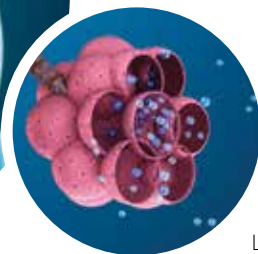

Léghólyagok

A **ZeptAir korszerű mikromembránja** ultrahang-sebességgel vibrálva állít elő nano aeroszol részecskéket, amelyek azonnal elérik a hörgőket ahelyett, hogy a légzőrendszer felső részében maradnának, így **közvetlenül segítik a fertőzés okának megszüntetését.**

Ultrahatékony aeroszolterápiás rendszer



Új fejlesztésű membrán-technológia

Szuperfinom, mélyen behatoló aeroszol részecskéket hoz létre, amelyek medián aerodinamikai átmérője **(MMAD-értéke) kevesebb mint 5 mikrométer**, és mélyen behatolnak a tüdőbe.

Alacsony zajszint

Gyorsan porlasztja a részecskéket, így **csendes** és **kényelmes** kezelést biztosít.

Kézre álló méret

Mindössze **108 grammot nyom**, így bárhová magával viheti és bármikor használhatja, akár egy kézzel is.

Akkumulátorral működik, ezért útközben is kényelmesen használható.

A készülék részei



- 1 Fedő
- 2 Gyógyszeradagoló csésze
- 3 Szórófej
- 4 Bekapcsoló gomb
- 5 A porlasztás mértékének növelése
- 6 A porlasztás mértékének csökkentése

- 7 Készüléktest
- 8 Nyitó gomb
- 9 USB töltőcsatlakozó
- 10 Szájrészt
- 11 Arcmaszk

Üzem módok

A készülék két üzemmóddal rendelkezik: **folyamatos működés** és **igény szerinti működés**.

Válassza ki a „**Mikrohullám**” üzemmódot a **bekapcsológomb** 3 másodpercig történő megnyomásával. Ebben a módban a készülék a légzési sebességnek megfelelően automatikusan beállítja a porlasztási sebességet.

Az **igény szerinti** frekvencia üzemmód lehetővé teszi a kézi beállítást. A két üzemmód között a **bekapcsológomb** megnyomásával válthat. A személyre szabott porlasztási sebességet a „+” vagy „-” gombok megnyomásával állíthatja be.

Gyógyszeradagoló csésze

Cserélhető és levehető csésze 10 ml folyékony oldat kapacitással. Bármilyen folyékony oldattal (gyógyszerekkel) használható.

Bekapcsológomb

Azonnali terápia egy gombnyomással.

Szájrész és maszk

A **Zepter hordozható inhalátor** minden korosztály számára használható **szájrész** vagy **maszk** segítségével, a maximális kényelem érdekében. Gyerekek is könnyen használhatják, mert elfoglalhatják magukat valamilyen játékkal (egy helyben ülve) vagy könyvet olvashatnak amíg a készülék a tüdejükbe juttatja a porlasztott gyógyszert.

USB töltés

A **töltési idő kb. 2 óra** és egy teljes feltöltés 60 perc folyamatos használatot tesz lehetővé, ami több adag gyógyszer porlasztásához is elegendő.

LED-jelzőfény jelzi az alacsony töltöttségi szintet.

Lélegezzen **könnyedén**, lélegezzen **egészségesen**

Egy **hordozható, könnyen használható** inhalátor, amely a **lehető legrövidebb idő alatt** nyújt igény szerinti megkönnyebbülést, jelentősen javítja az életminőségét, így Ön szabadabb, teljesebb életet élhet.

Bárhol is legyen - iskolában, munkahelyen, repülőn, séta közben vagy csak úgy általában útközben, a **ZeptAir mikromembrános inhalátor** segít visszanyerni az élete feletti irányítást.



Ez a **kicsi és kompakt készülék hatékony kezelést** biztosít az egész család számára, **bármikor és bárhol**.



A **ZeptAir** ideális megoldás olyan **idős betegek számára**, akiknek nehézséget okoz a hagyományos inhalátorok használata.



Zepter hordozható membrános inhalátor a Hyperlight Fluid Fusion szubcelluláris esszenciális komplexszel kombinálva

A Hyperlight Fluid Fusion szubcelluláris esszenciális komplexszel kombinálva a Zepter hordozható membrános inhalátor olyan terápiát biztosít, amely előnyös az egész szervezet és különösen a légzőrendszer számára. Rendszeres használat esetén segít kialakítani egy erős immunválaszt a kórokozó fertőzésekkel, tehát a baktériumokkal és vírusokkal szemben.



Tudjon meg többet a Zepter legújabb szabadalmaztatott technológiájáról: Hyperlight szubcelluláris esszenciális komplex



Zepter Ungarn Kft.
1138 Budapest,
Váci út 191.
www.zepter.hu